

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Κατά την εκκένωση του απινιδωτή, απομακρύνετε τα χέρια σας και όλα τα αντικείμενα από τον εξομοιωτή.

Υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο εξομοιωτή ή το καλώδιο ΗΚΓ είναι συνδεδεμένο με ασφάλεια στο AED. Βεβαιωθείτε ότι το περίβλημα του εξομοιωτή είναι άθικτο, καθώς και ότι δεν υπάρχουν εγκοπές, ρωγμές και τομές στο καλώδιο.

Μην εκκενώνετε τον απινιδωτή στον εξομοιωτή περισσότερες από τρεις φορές σε διάστημα ενός λεπτού. Μην εκκενώνετε ποτέ περισσότερα από 230 joule στον εξομοιωτή. Το AED περιορίζει τις εκκενώσεις σε λιγότερα από 5 joule, όταν αυτές λαμβάνουν χώρα στον εξομοιωτή.

Μην εμβαπτίζετε και μην τοποθετείτε τον εξομοιωτή σε υγρά. Η χρήση της συσκευής AED σε στάσιμο νερό ενέχει κίνδυνο ηλεκτροπληξίας για το χειριστή και τους παρατυχόντες.


Σημείωση: Για λεπτομέρειες όσον αφορά το χειρισμό του AED, ανατρέξτε στο κατάλληλο εγχειρίδιο Οδηγίες χρήσης της AED.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Ο εξομοιωτής AED είναι μια συσκευή που λειτουργεί με μπαταρία και στέλνει σήματα καρδιακού ρυθμού και ΚΑΡΠΑ εξομοίωσης σε οποιαδήποτε συσκευή ZOLL® AED. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον εξομοιωτή για να ελέγξετε την απόκριση του AED στους διάφορους καρδιακούς ρυθμούς. Ο εξομοιωτής περιλαμβάνει

- Ένα καλώδιο απινιδώσης για την εξομοίωση χρήσης ηλεκτροδίων απινιδώσης ενηλίκων με τις συσκευές AED Plus®, AED Pro® ή ZOLL AED 3™
- Τρία κουμπώματα απαγωγών ΗΚΓ (RA, LA, LL) για τη σύνδεση ενός καλωδίου ΗΚΓ AED Pro

ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

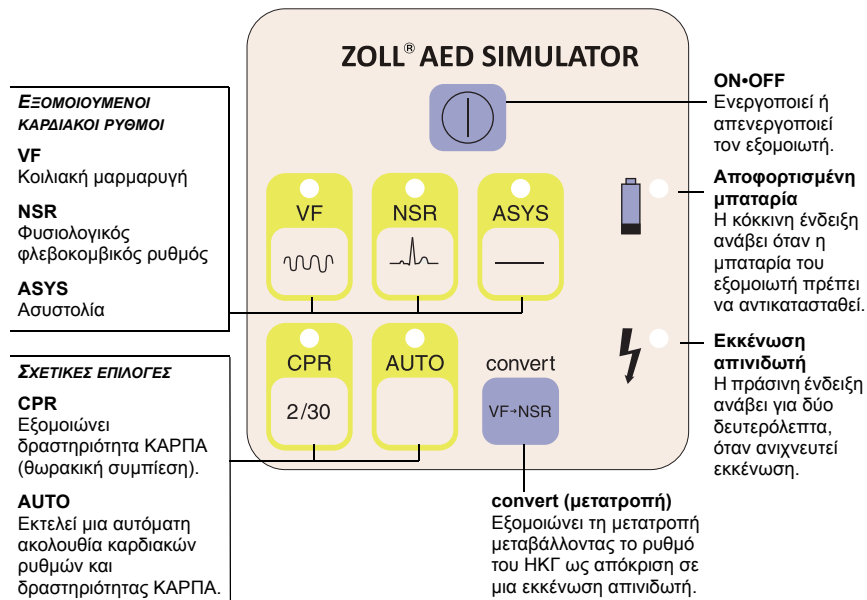

Οι φωτεινές ενδείξεις που βρίσκονται επάνω στα πλήκτρα δείχνουν τον επιλεγμένο καρδιακό ρυθμό και τυχόν ενεργοποιημένες επιλογές.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

► Για να προετοιμάσετε τον εξομοιωτή για χρήση:

1. Σύρετε τον πίνακα πρόσβασης που βρίσκεται στο πίσω μέρος του εξομοιωτή έως ότου ανοίξει και εγκαταστήστε μια αλκαλική μπαταρία 9 Volt. (Εάν ο εξομοιωτής ενεργοποιηθεί, πατήστε το πλήκτρο **ON•OFF** για να τον απενεργοποιήσετε.)
2. Για να εξομοιώσετε τη χρήση ηλεκτροδίων απινιδώσης ενηλίκων, συνδέστε το καλώδιο του εξομοιωτή στο σύνδεσμο καλωδίου ασθενούς του AED.
3. Όταν χρησιμοποιείτε συσκευή AED Pro, μπορείτε να εξομοιώνετε τη χρήση ηλεκτροδίων ΗΚΓ συνδέοντας το καλώδιο ΗΚΓ AED Pro στα κουμπώματα απαγωγών που βρίσκονται στην πλευρά του εξομοιωτή και εισάγοντας το καλώδιο ΗΚΓ στο σύνδεσμο καλωδίου ασθενούς του AED Pro.
4. Πατήστε το πλήκτρο **ON•OFF** για να ενεργοποιήσετε τον εξομοιωτή.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

► Επιλέξτε τον καρδιακό ρυθμό:

- VF** Κοιλιακή μαρμαρυγή (προεπιλογή όταν ενεργοποιείται ο εξομοιωτής)
- NSR** Φυσιολογικός φλεβοκομβικός ρυθμός
- ASYS** Ασυστολία

► Για να ελέγξετε την ανίχνευση θωρακικής συμπίεσης ΚΑΡΠΑ, πατήστε το πλήκτρο **CPR** (ΚΑΡΠΑ).

► Για να εκτελεστεί μια αυτόματη δοκιμαστική ακολουθία (ένας ρυθμός που επιτρέπει τη χορήγηση απινιδώσης, δραστηριότητα ΚΑΡΠΑ και τέλος ένας ρυθμός που δεν επιτρέπει τη χορήγηση απινιδώσης):

1. Πατήστε το πλήκτρο **AUTO**.
2. Ακολουθήστε τα φωνητικά μηνύματα AED.

► Για να εξομοιώσετε μετατροπή:

1. Επιλέξτε **VF**.
2. Πατήστε το πλήκτρο **convert** (μετατροπή). (Η ένδειξη **VF** πάλλεται πιο φωτεινή.)
3. Επιλέξτε το ρυθμό εξομοίωσης μετά από μια εκκένωση του απινιδωτή. (Η ένδειξη του δεύτερου ρυθμού αναβοσβήνει.)
4. Συνδέστε το καλώδιο εξομοιωτή στη μονάδα AED και, στη συνέχεια, ενεργοποιήστε την AED. Πραγματοποιήστε εκκένωση του απινιδωτή, ώστε να κάνετε μετατροπή από τον αρχικό ρυθμό στον δεύτερο ρυθμό.

Εάν ο εξομοιωτής δεν ανιχνεύσει εκκένωση απινιδωτή εντός 2 λεπτών, τότε ακυρώνει τη λειτουργία μετατροπής και συνεχίζει να παράγει τον αρχικό ρυθμό.

Για να ακυρώσετε μια διαδικασία μετατροπής μη αυτόματα, μπορείτε να πατήσετε ξανά το πλήκτρο **convert** (μετατροπή) ή να πατήσετε ξανά το πλήκτρο του αρχικού ρυθμού.

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

Για να εξοικονομήσετε ισχύ μπαταρίας, ο εξομοιωτής απενεργοποιείται αυτόματα έπειτα από αδράνεια 30 λεπτών (όταν δηλαδή δεν έχετε πατήσει κάποιο πλήκτρο ή πραγματοποιήσει εκκένωση του απινιδωτή).

► Για να απενεργοποιήσετε προσωρινά τη λειτουργία εξοικονόμησης μπαταρίας:

1. Απενεργοποιήστε τον εξομοιωτή.
2. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **convert** (μετατροπή) και ταυτόχρονα πατήστε και απελευθερώστε το πλήκτρο **ON•OFF**.
3. Όταν αναβοσβήσει η ένδειξη **VF**, απελευθερώστε το πλήκτρο **convert** (μετατροπή). (Η ένδειξη **VF** συνεχίζει να αναβοσβήνει για ένα δευτερόλεπτο ακόμη.)

Η λειτουργία εξοικονόμησης μπαταρίας παραμένει απενεργοποιημένη έως ότου απενεργοποιήσετε τον εξομοιωτή (ή έως ότου εξαντληθεί η μπαταρία). Την επόμενη φορά που θα ενεργοποιηθεί, ο εξομοιωτής επανενεργοποιεί τη λειτουργία εξοικονόμησης μπαταρίας.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Μέγεθος (μήκος • πλάτος • ύψος):	15,7 cm • 9,4 cm • 4,6 cm
Βάρος:	0,5 kg
Απαιτήσεις ισχύος:	Αλκαλική μπαταρία 9 Volt
Εύρη θερμοκρασίας:	Λειτουργίας: 5°C έως 35°C Αποθήκευσης: -10°C έως 50°C

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Καθαρίστε τον εξομοιωτή με ένα απαλό πανί, ήπιο σαπούνι και νερό. Μην τοποθετείτε κανένα τμήμα του εξομοιωτή σε νερό. Μη χρησιμοποιείτε οινόπνευμα ή κετόνες (όπως ασετόν ή MEK). Μην αποστειρώνετε τον εξομοιωτή.

Επιθεωρήστε τον εξομοιωτή για υλικές ζημιές. Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν τομές στη μόνωση όλων των καλωδίων, των συρμάτων και των ακροδεκτών ή λυγισμένες και σπασμένες ακίδες. Προστατεύστε τον εξομοιωτή από χυμένα υγρά και μην τοποθετείτε άλλα αντικείμενα επάνω του.

ΕΓΓΥΗΣΗ


(α) Ο εξομοιωτής ZOLL AED φέρει εγγύηση 90 ημερών από την ημερομηνία αποστολής. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, η ZOLL Medical Corporation θα επιδιορθώσει ή θα αντικαταστήσει (κατά τη απόλυτη διακριτική ευχέρεια της ZOLL Medical Corporation), χωρίς καμία επιβάρυνση του πελάτη, κάθε τμήμα του εξοπλισμού που θα βρεθεί από την ZOLL Medical Corporation να φέρει υλικά ή κατασκευαστικά ελαττώματα. Αν η επιθεώρηση από μέρος της ZOLL Medical Corporation δεν αποκαλύψει υλικά ή κατασκευαστικά ελαττώματα, θα ισχύσει η κανονικά χρέωση συντήρησης της ZOLL Medical Corporation. (β) Η ZOLL Medical Corporation δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιοδήποτε ελάττωμα του εξοπλισμού, την αποτυχία του εξοπλισμού να εκτελέσει οποιαδήποτε λειτουργία ή οποιαδήποτε άλλη μη συμμόρφωση του εξοπλισμού που προκαλούνται ή οφείλονται στα εξής: (i) οποιαδήποτε τροποποίηση του εξοπλισμού από τον πελάτη, εκτός και αν αυτή λάβει χώρα κατόπιν έγγραφης έγκρισης από την ZOLL Medical Corporation, (ii) χρήση του εξοπλισμού με οποιοδήποτε άλλο σχετικό ή δωρεάν εξοπλισμό, βοηθητικό εξάρτημα ή λογισμικό που δε διατίθεται από την ZOLL Medical Corporation, (iii) οποιαδήποτε εσφαλμένη χρήση ή κακή μεταχείριση του εξοπλισμού, (iv) έκθεση του εξοπλισμού σε συνθήκες διαφορετικές από τους περιορισμούς χώρου, ισχύος και λειτουργίας που καθορίζονται από την ZOLL Medical Corporation ή (v) εγκατάσταση ή καλωδίωση του εξοπλισμού που αντιτίθενται στις οδηγίες της ZOLL Medical Corporation. (γ) Αυτή η εγγύηση δεν καλύπτει αντικείμενα που υπόκεινται σε φυσιολογική φθορά κατά τη χρήση ή με συγκεκριμένη διάρκεια ζωής και περιλαμβάνουν ενδεικτικά λυχνίες, ασφάλειες, μπαταρίες, καλώδια και εξαρτήματα ασθενούς. (δ) Η παραπάνω εγγύηση δεν ισχύει για το λογισμικό που εμπεριέχεται ως μέρος του εξοπλισμού (συμπεριλαμβανομένου του ενσωματωμένου λογισμικού στη μνήμη ROM, γνωστού ως "firmware"). (ε) Η παραπάνω εγγύηση αποτελεί την αποκλειστική νομική κάλυψη του πελάτη και την αποκλειστική ευθύνη της ZOLL Medical Corporation για παραβίαση οποιασδήποτε εγγύησης σχετίζεται με τον παρεχόμενο εξοπλισμό που αναφέρεται στο παρόν. Η ΕΓΓΥΗΣΗ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ Η ZOLL MEDICAL CORPORATION ΑΡΝΕΙΤΑΙ ΡΗΤΑ ΚΑΘΕ ΑΛΛΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΕΙΤΕ ΕΙΝΑΙ ΓΡΑΠΤΗ, ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ, ΣΙΩΠΗΡΗ Ή ΕΚ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ, Η ΟΠΟΙΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Ή ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ

Διεθνείς πελάτες

Αφαιρέστε τη μπαταρία, συσκευάστε τον εξομοιωτή στην αρχική του συσκευασία (ή παρόμοια), και αποστείλετέ τον στον πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της ZOLL Medical Corporation.

ZOLL

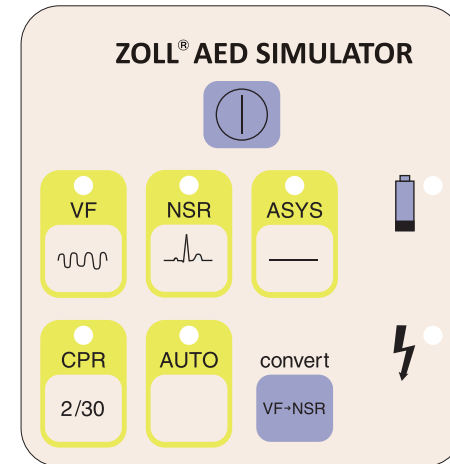

ΕΞΟΙΜΟΙΩΤΗΣ AED ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

9651-000820-19 Avaθ. Α

Ιούλιος 2016

Copyright © 2016 ZOLL Medical Corporation. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Τυπώθηκε στις Η.Π.Α.

CE