

10 Om ingen chock rekommenderas, eller efter en avgiven chock: "Starta HLR"

Under bröstkompressioner avger ZOLL AED 3 Real CPR Help®
-uppmaningar för kvaliteten på HLR-kompressionerna

9 Om chock rekommenderas, "tryck på blinkande chockknapp"

1 Sätt på defibrillatorn

2 "Kontrollera personens medvetande"

3 "Kalla på hjälp"

8 "Rör inte personen. Analys pågår"

7 "Sätt fast elektroder på personens bara bröst"

6 "Tryck på barnknappen om personen är ett barn"

5 "Kontrollera andningen"

4 "Öppna luftvägarna"

