

Thermogard XP®

REINIGUNGSANLEITUNG



Maßnahmen zur Reinigung des Thermogard XP

- Achten Sie darauf, dass das Gerät ausgeschaltet und das Netzkabel abgezogen wurde.
- Reinigen Sie das Gehäuse des Geräts mit einer Mischung aus einem milden Reinigungsmittel und Wasser und einem weichen Tuch.
- Verwenden Sie niemals Lösungsmittel oder scheuernde Reinigungsmittel für das Gerät. Vermeiden Sie heftiges Scheuern, insbesondere an der Vorderseite des Displays.
- Zur allgemeinen Dekontamination und Reinigung empfehlen wir keimabtötende Einwegreinigungstücher, die mindestens 55% Isopropylalkohol oder ein anderes zugelassenes, nicht korrosives Desinfektionsmittel in Klinikqualität enthalten.
- ZOLL empfiehlt ausdrücklich, das Desinfektionsmittel auf einer kleinen Fläche des Gehäuses zu testen, bevor alle Oberflächen des Geräts abgewischt werden. Befolgen Sie die Anweisungen des Herstellers des Desinfektionsmittels.
- Wischen Sie nach dem Reinigen das Gehäuse mit klarem Wasser und einem weichen Tuch ab, um verbliebene Flecken oder Rückstände zu entfernen.
- Ziehen Sie die Kondensatauffangschale an der unteren Vorderseite des Geräts heraus und entfernen Sie diese. Die Schale kann in heißem Seifenwasser gereinigt werden. Verwenden Sie niemals Lösungsmittel oder scheuernde Reinigungsmittel für die Schale. Trocknen Sie die Schale ab und schieben Sie sie wieder in das Gerät.

Hinweis: Betreiben Sie das Gerät nicht ohne eine ordnungsgemäß installierte Kondensatauffangschale. Andernfalls kann sich Wasser auf dem Boden unter dem Gerät ansammeln.

- Hinweise zum Umgang mit dem Kühlmittel, der vollständigen Reinigung und die Bedienungsanleitung finden Sie im Betriebshandbuch des Thermogard XP.

Produkte zur Reinigung des Thermogard XP

- Isopropanol IPA (70%) - Reinigungstücher
- Keimtötende Reinigungstücher (mit Bleichmittel)
- Warmes Wasser und Seife